

# BladderScan BVI 3000



## Kontroll och Underhåll på Medicinteknisk Avdelning

---

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll av utrustningen, dess funktion och prestanda.

- Kontrollera proben, leta efter repor/sprickor eller liknande skador som indikerar yttre våld mot proben. Vid skador på proben som kan härledas till yttre våld rekommenderas att den alltid skickas in för kontroll och ev. åtgärd hos leverantören.
- Lyssna efter missljud ifrån probe.
- Kontrollera att probekabel samt kontakten mellan probe/apparat inte har några synliga skador.
- Kontrollera hölje och knappar på apparaten samt att displayen är tydlig och att inga pixlar saknas.
- Genomför apparatens självttest. Aktivera självttest via ALT/SJÄLVTEST. Alla tester ska vara godkända.
- Kontrollera inställningarna för tid, datum och språk.
- Kontrollera skrivarens funktion. SKRIV/TESTUTSKRIFT. Om utskriften är suddig eller otydlig tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera noga batterierna, batteriladdarens hölje och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.
- Kontrollera att batteriernas kapacitet är minst 90 % av angiven kapacitet (1200mAh).
- Byt ut apparatens batterier vart 3:e år.
- Kontrollera att display inte fluktuerar i kontrast under scanning eller utskrift. Detta kan betyda att batteriets momentana strömkapacitet inte är tillräcklig och måste ersättas.
- Använd testfantom och kontrollera utseendet på scanbilden samt att volymen överensstämmer med angiven noggrannhet. Skulle uppmätt volym och scanbild inte stämma överens med i manualen beskriven prestanda kontakta leverantören för felsökning/kalibrering.

**Viktigt.** Använd inte utrustningen om förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall leverantören.

Tillverkaren rekommenderar Förebyggande Underhåll hos leverantören en gång per år för kontroll av utrustningen, dess funktion och prestanda.