

# BladderScan BVI 9400



Kontroll och Underhåll på Medicinteknisk Avdelning

---

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll utav utrustningen, dess funktion och prestanda.

- Kontrollera proben, leta efter repor/sprickor eller liknande skador som indikerar yttre våld mot proben. Vid skador på proben som kan härledas till yttre våld rekommenderas att den alltid skickas in för kontroll och ev. åtgärd hos leverantören.
- Lyssna efter missljud ifrån probe.
- Kontrollera att probekabel samt kontakten mellan probe/apparat inte har några synliga skador.
- Kontrollera hölje och knappar på apparaten samt att displayen är tydlig och att inga pixlar saknas.
- Genomför apparatens självtest. Aktivera självtest via ABC/SJÄLVTEST. Alla tester ska vara godkända. Kontrollera samtidigt skrivarens funktion. Om utskriften är suddig eller otydlig tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera inställningarna för tid, datum och språk.
- Kontrollera noga batterierna, batteriladdarens hölje, kabel och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.
- Kontrollera att display inte fluktuerar i kontrast under scanning eller utskrift. Detta kan betyda att batteriets strömkapacitet inte är tillräcklig och måste ersättas.
- Tillverkaren rekommenderar att BVI 9400 kalibreras 1 gång/år.
- Byt ut apparatens batterier vart 3:e år.

**Viktigt.** Använd inte utrustningen om förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall leverantören.