

# BladderScan BVI 3000



## Veckovis kontroll utav utrustningen

---

- Inspektera utrustningen, probe, kabel samt apparatens hölje, för att säkerställa att det inte finns några synliga skador så som repor, sprickor eller läckage.
- Genomför apparatens självtest. Aktivera självtest via ALT/SJÄLVTEST.
- Kontrollera skrivarens funktion. SKRIV/TESTUTSKRIFT. Om utskriften är suddig eller otydlig tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera att display inte fluktuerar i kontrast under scanning eller utskrift. Om så är fallet tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera batteri, batteriladdarens hölje, sladd och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.

**Viktigt.** Använd inte utrustningen om skador eller förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall alltid Medicinteknisk Avdelning alt. Allytec AB.

Tillverkaren rekommenderar Förebyggande Underhåll hos leverantören en gång per år för kontroll av utrustningen, dess funktion och prestanda.