

BladderScan BVI 9400

Rengöringsinstruktioner



Probe

- Torka av överskottsgel som finns på proben med pappershandduk/trasa.
- Torka rent proben med papperhandduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t. ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa med en mild tvållösning.
- Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t. ex. efter man undersökt smittsam patient.

Konsol

- Konsolen torkas av med fuktad pappershandduk/trasa och mild tvållösning.
- Undantagsvis, t. ex. efter undersökning av smittad patient, kan även den torkas av med en pappershandduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).

Obs!

- Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner.
- Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den.
- Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska.
- Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Stativ

Stativ rengörs med diskmedel och borste vid behov.