

# BladderScan BVI 9400

## Veckovis kontroll utav utrustningen



- Inspektera utrustningen, probe, kabel samt apparatens hölje, för att säkerställa att det inte finns några synliga skador så som repor, sprickor eller läckage.
- Genomför apparatens självtest. Aktivera självtest via ABC/SJÄLVTEST. Kontrollera samtidigt utskriften. Om den är suddig eller otydlig tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera att display inte fluktuerar i kontrast under scanning eller utskrift. Om så är fallet tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera batteri, batteriladdarens hölje, sladd och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.

**Viktigt.** Använd inte utrustningen om skador eller förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall alltid Medicinteknisk Avdelning alt. Allytec AB.

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll utav utrustningen, dess funktion och prestanda hos Medicinteknisk Avdelning.

Tillverkaren rekommenderar att BladderScan BVI 9400 kalibreras 1 gång/år.