

# BladderScan Prime



## Veckovis kontroll av utrustningen

---

- Inspektera utrustningen, probe, kabel samt apparatens hölje, för att säkerställa att det inte finns några synliga skador så som repor, sprickor eller läckage.
- Genomför apparatens självtester.
  - \* SJÄLVTEST av mjukvaran. Tryck INSTÄLLNINGAR och sen SJÄLVTEST.
  - \* SJÄLVTEST av proben. Tryck INSTÄLLNINGAR, KALIBRERING och sen TEST.
- Kontrollera att display inte fluktuerar i kontrast under scanning eller utskrift. Om så är fallet tyder det på att apparatens batterier behöver bytas ut.
- Kontrollera batteri, batteriladdarens hölje, sladd och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.

**Viktigt.** Använd inte utrustningen om skador eller förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall alltid Medicinteknisk Avdelning alt. Allytec AB.

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll av utrustningen, dess funktion och prestanda hos Medicinteknisk Avdelning.

Tillverkaren rekommenderar att BladderScan PRIME kalibreras 1 gång/år.