

BladderScan BVI 6100



ALLYTEC

Veckovis kontroll utav utrustningen

- Inspektera utrustningen för att säkerställa att det inte finns några synliga skador så som sprickor, repor eller läckage.
- Kontrollera laddarens hölje, sladd och nätanslutning så att inga synliga skador finns på dessa.

Viktigt. Använd inte utrustningen om skador eller förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall alltid Medicinteknisk Avdelning alt. Allytec AB.

BladderScan BVI 6100 skall kalibreras 1 gång/år.

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll utav utrustningen, dess funktion och prestanda hos Medicinteknisk Avdelning.