

# BladderScan BVI 6100



Förebyggande Underhåll på Medicinteknisk Avd.

---

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll utav utrustningen, dess funktion och prestanda.

- Kontrollera probe, hölje, knappar och display. Leta efter repor/sprickor eller liknande skador och kontrollera att displayen är tydlig.
- Lyssna efter missljud ifrån probe.
- Kontrollera noga laddarens hölje, sladd och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.
- BladderScan BVI 6100 skall kalibreras 1 gång/år. Om felmeddelande efter kalibrering - kontakta leverantören.

**Viktigt.** Använd inte utrustningen om förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall leverantören.