

BladderScan Prime



Förebyggande Underhåll på Medicinteknisk Avd.

Tillverkaren rekommenderar årligt underhåll och kontroll av utrustningen, dess funktion och prestanda.

- Kontrollera proben, leta efter repor/sprickor eller liknande skador som indikerar yttre våld mot proben. Vid skador på proben som kan härledas till yttre våld rekommenderas att den alltid skickas in för kontroll och ev. åtgärd hos leverantören.
- Lyssna efter missljud ifrån probe.
- Kontrollera att probekabel samt kontakten mellan probe/apparat inte har några synliga skador.
- Kontrollera hölje och knappar på apparaten samt att displayen är tydlig och att inga pixlar saknas.
- Genomför apparatens självtester.
 - * SJÄLVTEST av mjukvaran. Tryck INSTÄLLNINGAR och sen SJÄLVTEST.
 - * SJÄLVTEST av proben. Tryck INSTÄLLNINGAR, KALIBRERING och sen TEST.
- Kontrollera inställningarna för tid, datum och språk.
- Kontrollera noga batterierna, batteriladdarens hölje, kabel och nätanslutning så att inga skador finns på dessa.
- Kontrollera att display inte fluktuerar i kontrast under scanning eller utskrift. Detta kan betyda att batteriets strömkapacitet inte är tillräcklig och måste ersättas.
- Tillverkaren rekommenderar att Bladderscan Prime kalibreras 1 gång/år.
- Byt ut apparatens batterier vart 3-4:e år.

Viktigt. Använd inte utrustningen om förändringar gällande utrustningens prestanda eller funktion upptäcks. Kontakta i dessa fall leverantören.